

# HYALU·IN

Indicaciones : **TODO TIPO DE PIEL**

Zona de Aplicación: **FACIAL**

Duración del tratamiento en cabina : **40 - 50 minutos**

Frecuencia del tratamiento :

**según el tipo de piel y el criterio profesional**

1 o 2 SESIONES EN CABINA + CUIDADO DIARIO

## OBJETIVOS:

- Dar volumen a los labios.
- Alisar y prevenir las arrugas del contorno de los labios..

## PRODUCTOS NECESARIOS:

- LIPS·PEEL EXFOLIANTE
- HYAL FILLER BIOLÓGICO 5.0
- LIPS VEIL VELO VOLUMINIZADOR
- LIP BALM BÁLSAMO DE LABIOS
- ENPITSU DERMA PEN



## 1. RITUAL DE PREPARACIÓN:

- 1.1: Sobre los labios limpios aplicar el exfoliante LIPS PEEL
- 1.2: Trabajar con movimientos circulares
- 1.3: Retirar con agua fría.

## 2. TRATAMIENTO:

- 2.1: Aplicar BIOLÓGICO HYAL FILLER sobre los labios en la zona peribucal
- 2.2 Trabajar con Enpitsu Derma Pen.
- 2.3: No retirar.

## 3. POTENCIACIÓN DEL RESULTADO:

- 3.1:Aplicar velo voluminizador LIPS-VEIL
- 3.2: Dejar actuar de 6 a 8 minutos.
- 3.3: Retirar los excesos con una gasa.

## 4. FINALIZACIÓN:

- 4.1: Finalizar el tratamiento aplicando LIP·BALM con masaje.

## 5. RITUAL DE MANTENIMIENTO DIARIO

- 5.1: Aplicar el bálsamo de labios, una o dos veces al día.

