

HYDRA VACUUM

Indicaciones : **TODO TIPO DE PIEL**

Zona de Aplicación: **FACIAL**

Duración del tratamiento en cabina : **40 - 50 minutos**

Frecuencia del tratamiento :

según el tipo de piel y el criterio profesional

CHOQUE : 1 SESIÓN EN CABINA + CUIDADO DIARIO

NORMAL : 4 SESIONES EN CABINA + CUIDADO DIARIO

INTENSIVO : 8 SESIONES EN CABINA + CUIDADO DIARIO

OBJETIVOS:

- EFECTO TENSOR • LIMPIAR EN PROFUNDIDAD
- MEJORAR LA LUMINOSIDAD Y ASPECTO DE LA PIEL
- DISMINUCIÓN DEL PORO • BLANQUEAMIENTO • REGENERACIÓN
- HIDRATACIÓN

PRODUCTOS NECESARIOS:

- LECHE BASIC LINE
- DEPURADORA BIJIN
- AGUA MICELAR BASIC LINE
- PEELING QUÍMICO ÁCIDO SALICÍLICO, PREPEEL Y POSTPEEL
- POTENCIADOR HYDRA VACUUM DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA PIEL
- MASCARILLA NATURAL ALGAE MASK + AGUA THERMAL
- SERUM DETOX

1. RITUAL DE PREPARACIÓN:

1.1: Limpiar la piel con LECHE BASIC LINE. Retirar con agua fría.

1.2: Limpiar la piel con CREMA DEPURADORA BIJIN, trabajar con movimientos circulares durante 3-4 minutos.

1.3: Retirar con agua fría.

1.4: Aplicar AGUA MICELAR BASIC LINE

1.5: Realizar peeling químico con el ÁCIDO SALICÍLICO.

- Aplicar PrePeel con una gasa por cara y cuello.
- A continuación aplicar el ácido con gasa. Dejar actuar un mínimo de 4 a 8 minutos.
- Una vez transcurrido el tiempo retiramos el exceso de ácido con una gasa en seco y encima aplicamos el PostPeel
- Dejar actuar de 1 a 4 minutos
- Retirar con abundante agua.

2. TRATAMIENTO:

2.1: Seleccionar el potenciador más adecuado de acuerdo a la piel a tratar.

Colocar en la máquina.

2.2: Realizar las pasadas con HYDRA VACUUM por cara, cuello y escote (de 15 a 20 min)

Utilizar el cabezal 1 para la limpieza en general.

Utilizar el cabezal 2 para zonas con mayor acumulación de suciedad como mentón y entrecejo.

Utilizar el cabezal 3 para zonas pequeñas como la nariz o comedones localizados.



3. POTENCIACIÓN DEL RESULTADO:

3.1: Colocar un disco de mascarilla en un recipiente con 6 ml de agua thermal. Disolver con la ayuda de un pincel cosmético. 3.2: Distribuir el gel por igual en la piel, dejando fuera la línea del cabello y las cejas.

3.3: Masajear la piel durante 10/15 minutos. Vuelva a humedecer las yemas de los dedos, si es necesario, para mantener la humedad del gel.

3.4: Retire cualquier residuo con una toalla húmeda (tibia o fría).

4. FINALIZACIÓN:

4.1: Finalizar el tratamiento aplicando SERUM DETOX.

5. CURA POST TRATAMIENTO :

5.1: Limpiar rostro, cuello y escote con DEPURADORA BIJIN.

5.2: Recomendar **DETOX KIT**

Modo de uso:

Los siete días siguientes al tratamiento aplicar por la noche: sobre la piel limpia el contenido de una ampolla de ácido salicílico y a continuación el serum.

Por la mañana: aplicar el serum.

